

- Questo è un dispositivo medico ottenibile senza prescrizione medica.
- Leggere con attenzione l'intero foglio illustrativo: contiene informazioni importanti per il consumatore.
- Conservare il foglio illustrativo per poterlo consultare all'occorrenza.
- Per ulteriori informazioni o consigli, rivolgersi al proprio medico e/o farmacista.

Cicatridina®

ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,2%
pomata

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico sale sodico 0,2%, acqua, olio di vaselina, alcool cetilstearylco, olio di mandorle dolci, STEARETH-2, STEARETH-21, glicerina, sorbitolo, olio di silicone, clorexidina digluconato, imidazolidinil urea, EDTA sale bisodico, BHT.

CONFEZIONE

La confezione vendita contiene un tubo da 60 g.

CHE COSA È E PERCHÉ SI USA

CICATRIDINA pomata esplica la sua attività grazie alla presenza dell'acido ialuronico, un mucopolisaccaride abbondantemente distribuito in molteplici tessuti corporei. L'acido ialuronico, grazie alla sua capacità di trattenere acqua, forma un film che idrata, accelera e migliora il processo di riepitelizzazione e riparazione tissutale.

INDICAZIONI

Trattamento coadiuvante dei processi riparativi in caso di:

- Irritazioni e arrossamenti, anche a seguito di interventi di peeling, depilazione e laser
- Lesioni superficiali: screpolature, graffi, escoriazioni, eritemi, tagli superficiali
- Lesioni profonde: ferite chirurgiche, ustioni di I e II grado, piaghe da decubito, ulcere

MODALITÀ D'USO

Lavarsi le mani prima e dopo l'uso del dispositivo medico. Si consiglia un'accurata detersione della parte da trattare prima di ogni applicazione. Rompere il sigillo del tubo mediante il retro-tappo. Dosare un'adeguata quantità di prodotto in funzione dell'area da trattare e applicarla con lieve massaggio. Eventualmente proteggere con una garza. Richiudere il tubo con il tappo.

Adulti e bambini: effettuare 2/3 applicazioni al giorno o secondo prescrizione medica.

Se necessario CICATRIDINA pomata può essere utilizzato per periodi prolungati, in ogni caso dopo 30 giorni di utilizzo continuativo sospendere il trattamento e consultare il medico.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto.

INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

Non sono note interazioni con altri prodotti, pertanto è consigliabile consultare il medico prima di utilizzare CICATRIDINA pomata in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci ad uso topico.

EFFETTI INDESIDERATI

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso, o qualora si riscontrassero altri effetti indesiderati, interrompere il trattamento e consultare il proprio medico o il farmacista.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. In caso di gravidanza o allattamento, non essendo stati effettuati studi clinici specifici, consultare il medico prima dell'utilizzo del dispositivo.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservare il dispositivo medico ben chiuso, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal calore. Dopo la prima apertura non utilizzare il prodotto in caso di visibili segni di degradazione come ingiallimento o odore sgradevole.

SMALTIMENTO

Chiedere al farmacista come eliminare i dispositivi medici scaduti o non più utilizzati.

SMALTIMENTO IMBALLAGGI VUOTI:

Astuccio (PAP 21) e foglio illustrativo (PAP 22): Raccolta carta.

Tubo (ALU 41): Raccolta alluminio.

Tappo (PP 5): Raccolta plastica.

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

DISPOSIZIONI PER I DISPOSITIVI MEDICI DA REGOLAMENTO UE 2017/745

È necessario segnalare al fabbricante qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al seguente indirizzo email: quality@farmaderma.it. Tale segnalazione deve inoltre essere effettuata all'autorità competente dello Stato membro in cui si risiede.

DISPOSITIVO MEDICO  0477

Data di emissione ultima versione delle istruzioni per l'uso: 11/2022.



Leggere le istruzioni per l'uso



Data di scadenza

LOT

Numero di lotto



Fabbricante

UDI

Identificativo unico del dispositivo (UDI)



Fabbricante: FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA

Per segnalazioni: www.farmaderma.it (Contatti/Assicurazione Qualità)