

- Questo è un dispositivo medico ottenibile senza prescrizione medica.
- Leggere con attenzione l'intero foglio illustrativo: contiene informazioni importanti per il consumatore.
- Conservare il foglio illustrativo per poterlo consultare all'occorrenza.
- Per ulteriori informazioni o consigli, rivolgersi al proprio medico e/o farmacista.

# Ginexid<sup>®</sup>

## lavanda vaginale

### COMPOSIZIONE

Acqua, acqua distillata di rose, acqua distillata di camomilla, acqua distillata di hamamelis, clorexidina digluconato, essenza di lavanda, acido lattico, cocamidopropil betaina, PPG-26-buteth-26, PEG-40 Olio di ricino idrogenato.

### COME SI PRESENTA

La confezione contiene 5 flaconi monouso da 100ml con 5 cannule monouso. Ogni flacone contiene una dose già pronta per una irrigazione vaginale.

### CHE COSA È E PERCHÉ SI USA

GINEXID lavanda vaginale esplica la sua azione attraverso l'irrigazione vaginale.

Grazie alla sua delicata azione detergente ed al suo pH, aiuta a mantenere intatte le difese naturali della vagina. Inoltre, per la presenza di specifici ingredienti di origine vegetale, ha un'azione lenitiva e rinfrescante.

### INDICAZIONI

Complemento igienico ad uso vaginale indicato come trattamento coadiuvante e preventivo degli stati flogistici vaginali, di cui contribuisce ad attenuare la sintomatologia (bruciore, irritazioni e prurito).

Inoltre è utile per:

- detergere e asportare residui di medicinali usati per via vaginale (leggere prima le istruzioni sulla confezione degli stessi);
- l'igiene intima abituale;
- l'igiene intima al termine del periodo mestruale;
- l'igiene intima dopo rapporti sessuali;
- detergere in caso di secrezioni vaginali abbondanti.

### QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto.

#### *Gravidanza*

In tale circostanza è opportuno consultare il proprio medico.

## INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

Si consiglia di consultare il medico prima di utilizzare il prodotto in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci ad uso vaginale.

## COME DEVE ESSERE UTILIZZATO

Effettuare 1-2 lavande alla settimana o secondo prescrizione medica.

Ruotare la parte superiore del tappo a farfalla sino alla rottura e inserire la cannula sul tappo del flacone, esercitando una leggera pressione. Assumere una posizione confortevole (seduti o leggermente distesi sul bidet o sul WC) e introdurre delicatamente 3-4 cm della cannula in vagina. Non inserire la cannula in profondità. Premere lentamente il flacone (preferibilmente capovolto) e far defluire gradualmente tutta la soluzione all'interno della vagina. Al termine della lavanda non risciacquare. Non riutilizzare il flacone e la cannula dopo l'uso e smaltirli.

## EFFETTI INDESIDERATI

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Qualora si riscontrassero questi o altri effetti indesiderati interrompere il trattamento ed informare il proprio medico o il farmacista.

## AVVERTENZE

Un'irrigazione violenta o un inserimento troppo in profondità della cannula potrebbe causare il passaggio della cannula e/o della soluzione oltre il canale vaginale e in alcuni casi provocare una reazione vagale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. L'eventuale presenza di depositi sul fondo non indica alterazione del prodotto.

## SCADENZA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal calore. Chiedere al farmacista come smaltire il dispositivo medico scaduto o non più utilizzato.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti:

- Astuccio (**PAP 21**) e foglio illustrativo (**PAP 22**): Raccolta carta.
  - Flacone (**LDPE 4**), tappo (**HDPE 2**), cannula (**7**) e involucro cannula (**PP 5**): Raccolta plastica.
- Verifica le disposizioni del tuo Comune.

## DISPOSITIVO MEDICO 0373

Data di emissione ultima versione delle istruzioni per l'uso: novembre 2021.



**Fabbricante:**  
**FARMA-DERMA s.r.l.**

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA

Per segnalazioni: [www.farmaderma.it](http://www.farmaderma.it) (Contatti/Assicurazione Qualità)