

- Questo è un dispositivo medico ottenibile senza prescrizione medica.
- Leggere con attenzione l'intero foglio illustrativo: contiene informazioni importanti per il consumatore.
- Conservare il foglio illustrativo per poterlo consultare all'occorrenza.
- Per ulteriori informazioni o consigli, rivolgersi al proprio medico e/o farmacista.
- Consultare il medico se non si nota un miglioramento della sintomatologia.

IALOCLEAN®

SPRAY PER MUCOSA ORO-FARINGEA a base di acido ialuronico

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico sale sodico (0,5mg/ml), camomilla estratto secco, N-acetilcisteina, sodio benzoato, potassio sorbato, glicerina, saccarina sodica, acido citrico, arginina, aroma menta, acqua.

CONFEZIONE

La confezione vendita contiene un flacone in vetro da 30 ml con erogatore.

CHE COSA È E PERCHÉ SI USA

IALOCLEAN è una soluzione in spray a base di acido ialuronico che esercita un effetto protettivo e di barriera nei confronti della mucosa oro-faringea soggetta ad arrossamenti ed infezioni. L'acido ialuronico infatti aderisce sulla superficie della mucosa e, trattenendo l'acqua fisiologicamente presente, forma una pellicola protettiva che svolge un'azione lubrificante ed emolliente e dona sollievo alla mucosa, proteggendola da agenti esterni nocivi e dai patogeni. IALOCLEAN permette quindi di alleviare tutti quei sintomi legati agli stati irritativi e infiammatori quali tosse stizzosa o di natura irritativa, raucedine, deglutizione difficoltosa, sensazione di corpo estraneo in gola, di solletico o di secchezza.

INDICAZIONI

IALOCLEAN spray per mucosa oro-faringea è indicato come trattamento coadiuvante delle affezioni delle vie respiratorie dovute a oro-faringiti sia in fase acuta che cronica, sindromi influenzali o da raffreddamento, reflusso gastrico.

MODALITÀ D'USO

Al primo utilizzo del prodotto, per ottenere una regolare erogazione, premere alcune volte a vuoto il tasto erogatore. Può essere necessario ripetere tale operazione se lo spray non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. La corretta erogazione del prodotto può avvenire solo con la cannula erogatrice in posizione orizzontale.

Si raccomanda di fare un uso personale del dispositivo medico.

Lavarsi le mani prima dell'utilizzo del dispositivo medico.

1. Ruotare la cannula erogatrice in posizione orizzontale.
2. Introdurre nel cavo orale l'estremità della cannula erogatrice.
3. Premere a fondo il tasto dell'erogatore esercitando una pressione continua fino ad esaurimento dell'erogazione dosata. Durante l'uso mantenere il flacone verticale. Premere nuovamente per ottenere una successiva erogazione.
4. Dopo l'utilizzo ripiegare la cannula erogatrice in posizione verticale e riporre il flacone all'interno della confezione.

È opportuno non ingerire cibo, bevande o altro subito dopo l'uso del prodotto.

Adulti: effettuare tre o quattro erogazioni fino a 5 volte al giorno.

Bambini dai 2 anni di età: effettuare due o tre erogazioni fino a 4 volte al giorno.

La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi; IALOCLEAN spray per mucosa oro-faringea può essere utilizzato fino alla loro completa risoluzione.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto.

INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

Non sono note interazioni con altri prodotti, pertanto è consigliabile consultare il medico prima di utilizzare IALOCLEAN spray per mucosa oro-faringea in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci somministrati localmente sulla mucosa oro-faringea.

EFFETTI INDESIDERATI

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso, o qualora si riscontrassero altri effetti indesiderati, interrompere il trattamento e consultare il proprio medico o il farmacista.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. L'eventuale presenza di un odore sulfureo non indica alterazioni del preparato, ma è propria di un componente della formulazione. In caso di gravidanza o allattamento, non essendo stati effettuati studi clinici specifici, consultare il medico prima dell'utilizzo del dispositivo.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservare chiuso, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal calore. Evitare temperature superiori a 30 °C. Dopo la prima apertura, il prodotto, correttamente conservato, può essere utilizzato fino alla data di scadenza.

SMALTIMENTO

Chiedere al farmacista come smaltire il dispositivo medico scaduto o non più utilizzato.

SMALTIMENTO IMBALLAGGI VUOTI:

– Astuccio (PAP 21) e foglio illustrativo (PAP 22): Raccolta carta.

– Flacone ed erogatore (C/GL 95): Raccolta vetro.

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

DISPOSIZIONI PER I DISPOSITIVI MEDICI DA REGOLAMENTO UE 2017/745

È necessario segnalare al fabbricante qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al seguente indirizzo email: quality@farmaderma.it. Tale segnalazione deve inoltre essere effettuata all'autorità competente dello Stato membro in cui si risiede.

DISPOSITIVO MEDICO  **0477**

Data di emissione ultima versione delle istruzioni per l'uso: 09/2024.



Leggere le istruzioni
per l'uso



Data di scadenza



Numero di lotto



Fabbricante



Identificativo unico
del dispositivo (UDI)



Fabbricante: FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA

Per segnalazioni: www.farmaderma.it (Contatti/Assicurazione Qualità)