

- Questo è un dispositivo medico ottenibile senza prescrizione medica.
- Leggere con attenzione l'intero foglio illustrativo: contiene informazioni importanti per il consumatore.
- Conservare il foglio illustrativo per poterlo consultare all'occorrenza.
- Per ulteriori informazioni o consigli, rivolgersi al proprio medico e/o farmacista.
- Se la sintomatologia persiste dopo un certo periodo di tempo, consultare il medico.

IALOCLEAN®

SPRAY PER MUCOSA ORO-FARINGEA a base di acido ialuronico

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico sale sodico, estratto secco di camomilla, sodio benzoato, glicerina, L-arginina, potassio sorbato, N-acetilcisteina, sodio saccarinato, aroma menta, acido citrico, acqua.

COME SI PRESENTA

La confezione contiene un flacone in vetro da 30 ml con erogatore.

CHE COSA È E PERCHÉ SI USA

IALOCLEAN è una soluzione in spray a base di acido ialuronico che esercita un effetto protettivo e di barriera nei confronti della mucosa oro-faringea soggetta ad arrossamenti ed infezioni. L'acido ialuronico infatti aderisce sulla superficie della mucosa e, trattenendo l'acqua fisiologicamente presente, forma una pellicola protettiva che svolge un'azione lubrificante ed emolliente e dona sollievo alla mucosa, proteggendola da agenti esterni nocivi e dai patogeni. IALOCLEAN permette quindi di alleviare tutti quei sintomi legati agli stati irritativi e infiammatori quali tosse stizzosa o di natura irritativa, raucedine, deglutizione difficoltosa, sensazione di corpo estraneo in gola, di solletico o di secchezza.

INDICAZIONI

IALOCLEAN spray per mucosa oro-faringea è indicato come trattamento coadiuvante delle affezioni delle vie respiratorie dovute a oro-faringiti sia in fase acuta che cronica, sindromi influenzali o da raffreddamento, reflusso gastrico.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto.

Gravidanza e allattamento

In tali circostanze si consiglia di consultare il proprio medico.

INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

Si consiglia di consultare il medico prima di utilizzare IALOCLEAN spray per mucosa oro-faringea in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci somministrati localmente sulla mucosa oro-faringea.

COME DEVE ESSERE UTILIZZATO

Al primo utilizzo del prodotto, per ottenere una regolare erogazione, premere alcune volte a vuoto il tasto erogatore. Può essere necessario ripetere tale operazione se lo spray non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. La corretta erogazione del prodotto può avvenire solo con la cannula erogatrice in posizione orizzontale.

Si raccomanda di fare un uso personale del dispositivo medico.

1. Ruotare la cannula erogatrice in posizione orizzontale.
2. Introdurre nel cavo orale l'estremità della cannula erogatrice.
3. Premere a fondo il tasto dell'erogatore esercitando una pressione continua fino ad esaurimento dell'erogazione dosata. Durante l'uso mantenere il flacone verticale. Premere nuovamente per ottenere una successiva erogazione.
4. Dopo l'utilizzo ripiegare la cannula erogatrice in posizione verticale.

È opportuno non ingerire cibo, bevande o altro subito dopo l'uso del prodotto.

QUANDO E PER QUANTO TEMPO

Adulti: effettuare tre o quattro erogazioni fino a 5 volte al giorno.

Bambini: effettuare due o tre erogazioni fino a 4 volte al giorno.

La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi; se necessario ai fini del miglioramento, IALOCLEAN spray per mucosa oro-faringea può essere assunto per periodi prolungati.

EFFETTI INDESIDERATI

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Qualora si riscontrassero questi o altri effetti indesiderati interrompere il trattamento ed informare il proprio medico o il farmacista.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. L'eventuale presenza di un odore sulfureo non indica alterazioni del preparato, ma è propria di un componente della formulazione.

SCADENZA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservare ben chiuso, al riparo dalla luce e dal calore. Chiedere al farmacista come smaltire il dispositivo medico scaduto o non più utilizzato.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti:

- Flacone ed erogatore (C/GL 95): Raccolta vetro.
 - Astuccio (PAP 21) e foglio illustrativo (PAP 22): Raccolta carta.
- Verifica le disposizioni del tuo Comune.

DISPOSITIVO MEDICO 1282

Data di emissione ultima versione delle istruzioni per l'uso: maggio 2021.



Fabbricante: FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA

Per segnalazioni: www.farmaderma.it (Contatti/Assicurazione Qualità)